

Jia Jab (Tube Holder)



ข้อบ่งชี้
 ออกแบบมาเพื่อยึดทางเดินหายใจ
 ชั้นสูง เช่น Endotracheal
 Tubes(ETs), Laryngeal Mask
 Airways(LMAs) และ
 Supraglottic Airway(SGAs) อื่นๆ
 ใช้กับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 8ปี ขึ้นไป
 ควรใช้ในระยะเวลาสั้นๆ

คำเตือน

- ควรทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
- ชั้นต่อช่วยหายใจให้แน่นพอยึด
 ได้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
- ไม่ควรใช้ซ้ำ ควรใช้ครั้งเดียว
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ติดเชื้อ
 จากคนสู่คน และ จะทำให้
 ประสิทธิภาพการใช้งานของ
 เครื่องมือลดลง ทางบริษัท จะไม่
 รับผิดชอบเมื่อมีการใช้ซ้ำ
- ควรตรวจสอบ เครื่องมือก่อนการ
 ใช้งานทุกครั้ง
- ควร ติดตามอาการ ผู้ป่วยขณะ
 ใช้เครื่องมืออยู่ตลอดเวลา

ข้อระวัง

- ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
- ใช้หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว
 เท่านั้น
- ไม่แนะนำ ให้มาซื้อและใช้ซ้ำ

วิธีใช้

1. ใส่ท่อช่วยหายใจและตรวจสอบ
 ตำแหน่งให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว
2. จัด tube holder ตามรูปโดยให้ ด้าน
 ทึบอยู่ที่จมูก
3. ใส่ tube holder เข้าในปาก พร้อมจัด
 ตำแหน่งตามรูป วัดระยะความยาวท่อ
 ได้ที่ริมฝีปาก
 - โดย anti bite อยู่ในปากผู้
 ป่วย**ตรวจสอบ ระวัง ริมฝีปากถูก
 ฟัน และ anti bite กัดทับ
4. หมุนเกลียวสีแดง ให้ ท่อช่วยหายใจ
 ยึดติดกับ tube holder ให้แน่นสนิท.
5. จับแถบสีแดง ลอดใต้คอผู้ป่วย(โดยไม่
 ต้องยกคอขึ้น)
6. นำแถบสีแดงที่ลอดใต้คอมาแล้ว สอด
 เข้าอีกด้านของ tube holder
7. จัดสายรัด ให้เรียบร้อย โดยให้อยู่ใต้
 ไบหู แล้ว รัดให้แน่นแนบสนิท.
8. แกะแถบสีแดงออก และ พร้อมประเมิน
 ผู้ป่วยต่อเนือง.