

Disposable Endotracheal Tube Holder


อุปกรณ์ยึดท่อช่วยหายใจ

แบบ ดูแลช่องปากได้ง่าย แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

1. เช็ดท่อหายใจด้วย แอลกอฮอล์ ห้ามใช้สารละลาย ไอโอดีน แล้วปล่อยให้แห้ง




2. เช็ด/โกนหนวดบริเวณที่จะติดแผ่น adhesive base และด้านเทพกาวของแผ่นฐาน tubeholder(adhesive base) และแปะบริเวณเหนือริมฝีปาก ด้านโค้งของแผ่น adhesive base holderสามารถวางหงายขึ้น หรือลงได้ ในกรณีผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณใบหน้า ควรเปลี่ยนทุก3วัน รูป A

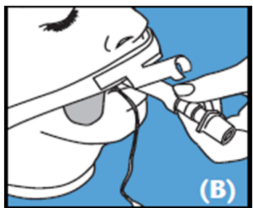


3. วางสาย neck bandบริเวณส่วนตีนตุ๊กแกของแผ่นadhesive base โดยวางช่องล็อกท่อช่วยหายใจ ในแนวเดียวกับ ET TUBE. รูป (B)



4. รัดสายneck bandรอบคิระหะให้กระชับ. ในตำแหน่งใต้ใบหู รูป (C)

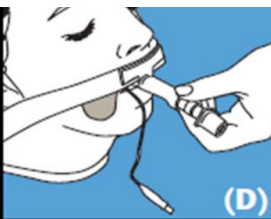

5. ดัน ET TUBE เข้าไปในช่องล็อก รูป (D)

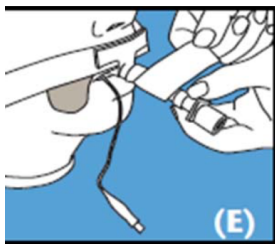

6. ผ้าหรือเทพกาวพันรอบ ET TUBE และตัวล็อกให้แน่น โดยพันให้รอบ ยาวอย่างน้อย 1 นิ้ว รูป (E) ปรับ neck band e ให้แน่น,กระชับ



การติดแผ่น adhesive baseสามารถปรับได้ตามความต้องการ สามารถติดแผ่นadhesive base ที่บริเวณขากรรไกรล่าง โดยติดด้านโค้งให้ขึ้นบน หรือตัดแผ่นadhesive baseบริเวณด้านโค้งไปติดไว้ที่ข้างแก้มของผู้ป่วยแผ่นadhesive base รูปที่(1-4)