


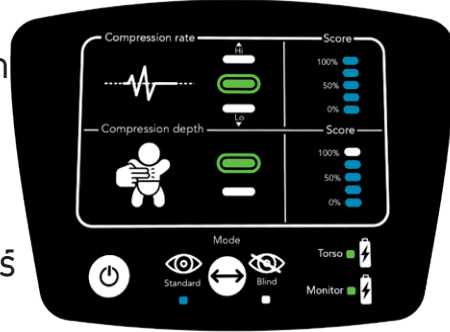

มอนิเตอร์

กรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้น แล้วยังไม่สามารถจับคู่กับหุ่น แนะนำให้ทำการ reset มอนิเตอร์

การ reset มอนิเตอร์-ให้กดปุ่ม "mode" ประมาณ 7 วินาที จนรูป rate และ compression กระพริบไฟ จากนั้น กดปุ่มปิดที่มอนิเตอร์ และ ทำตามขั้นตอนจับคู่ แบบข้างต้นใหม่



แบตเตอรี่

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อมีไฟสีแดงกระพริบที่มอนิเตอร์ สามารถใช้แบบแบบ rechargeable ได้



ประกอบด้วย



คู่มือการใช้จอแสดงผล



WIRELESS MONITOR



ELECTRONIC FEEDBACK



BLIND MODE



TEST REPORT AFTER TRAINING



ชุดฝึกการช่วยชีวิตขนาดเด็กเล็ก
พร้อมด้วยจอแสดงผลแบบไร้สาย

บริษัท เค็ยริกะ จำกัด

36/5 หมู่ 7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

Facebook : JiACPR Tel. 0909791212



MEETS
AHA/ERC
FEEDBACK
REQUIREMENTS

PRACTI-BABY PLUS

ELECTRONIC CPR TRAINING

KEY FUNCTIONS

COMPRESSION FEEDBACK

RATE: 100 <=> 120 bpm

Compression rate

DEPTH: 1/3 Chest Diameter

Compression depth


Score

TEST REPORT
WAIT 10 SECONDS


Score

SETTING UP

x 1 TORSO

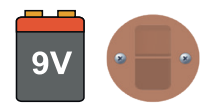

x 1 MONITOR

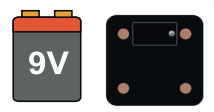

ใส่แบตเตอรี่เข้าที่ตัวหุ่นและมอนิเตอร์

ADDITIONAL FUNCTIONS

STANDARD/BLIND OPTION
Allows you to select standard or blind mode.

STANDARD MODE

Mode

BLIND MODE

Mode



การจับเชื่อมต่อหุ่นและจอแสดงผล(การจับคู่)
เปิดปุ่มเปิด ที่มอนิเตอร์ และกดหน้าอกที่ตัวหุ่น จน
ได้ยินเสียงและไฟTorsoที่มอนิเตอร์ ขึ้นเป็นสีเขียว