


คำถามที่พบบ่อย

หน้าจอ monitor

หากคุณไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ตามขั้นตอนที่ให้มาคุณควรรีเซ็ตจอ monitor การรีเซ็ตจอ monitor : ใ้กดปุ่ม "ผู้ใหญ่- เด็ก" ประมาณ 7 วินาที จนกระทั่งรูปอัตราเร็ว rate และรูปการกดหน้าอก จะพริบหนึ่งครั้ง

ปิด monitor และเริ่มต้นกระบวนการจับคู่ pairing ใหม่

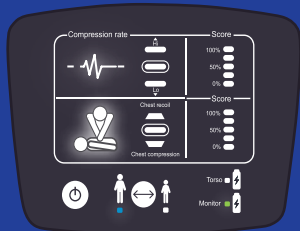

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ใช้ใน Practi-Man Plus ควรเปลี่ยนเมื่อมีไฟสีแดง ปรากฏบนจอ monitor การใช้แบตเตอรี่ที่หมดสภาพไม่พอกับตัว monitor หรือตัวหุ่น จะขัดขวางการทำงานที่เหมาะสมของ Practi-Man Plus การใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของเห็ยริชกา และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริการซ่อมฟรีกับค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อท่านนำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการแต่งตั้งของบริษัท หรือศูนย์บริการของบริษัทฯ เองโดยตรง
3. โดยภายใน 5 วันทำการ จะส่งอุปกรณ์สำรองไปให้ก่อน จนกว่าซ่อมอุปกรณ์ที่นำเรียบบริษัทแล้ว
4. กรุณามารับอุปกรณ์ คืนภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับอุปกรณ์ มิฉะนั้นแล้วบริษัทก็จะว่ายินยอมบริจาควินิจฉัยให้สถานศึกษาหรือสาธารณชนกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
5. ช่วงเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับอุปกรณ์
6. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ การตกหล่น ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 - 6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกดัด แก้ไข และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัทฯ
 - 6.3 ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แร่ดับไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
 - 6.4 การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part)
 - 6.5 การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นมาใช้ร่วม รวมไปถึง เลข serial number จาวงหรือหายไป
7. บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หากมีการขัดข้อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาตามปกติ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนขอค่าบริการและค่าอะไหล่

รายละเอียดการรับประกัน

ชนิดของสินค้า	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)	วันที่เริ่มรับประกัน
วันสิ้นสุดรับประกัน	ชื่อผู้ซื้อ	ที่อยู่
	โทรศัพท์	E-mail

ชื่อจาก บริษัท เห็ยริชกา จำกัด (สำนักงานใหญ่) *หมายเหตุ: โปรดแสดงใบรับประกันสินค้านี้ทุกครั้ง เมื่อนำสินค้าเข้ารับบริการในช่วงระยะเวลาประกัน



คู่มือหุ่นฝึก

PRACTI-MAN

plus

คู่มือการใช้งานอมอนิเตอร์



- เชื่อมต่อกับ monitor เบบีไร้สาย
- แสดงผลการปั๊ม
- 2 in 1 2 ใน 1 ใช้ร่วมกับทั้งแบบ ผู้ใหญ่และเด็ก
- โหมด blind (ปิดไฟ)
- การรายงานผล หลังการฝึกอบรม

บริษัท เห็ยริชกา จำกัด
36/5 หมู่ 7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Facebook : JIACPR Tel. 0909791212





โหมดการทำงานที่สำคัญ

การแสดงผล

จังหวะการกด
 Compression rate: [Heart rate icon] [Progress bar] [Hi/Lo buttons] [Green checkmark]

ความรู้สึกในการกด
 Chest recoil: [Person icon] [Progress bar] [Green checkmark]
 Chest compression: [Person icon] [Progress bar] [Green checkmark]

ผลการทดสอบ
 Score: [Progress bar] [100% 50% 0%]
 ๑๐ วินาที

ปุ่มsetting

ใส่แบตเตอรี่ที่ตัวหุ่น torso และจอmonitor

x 2 9V

TORSO

MONITOR

การเชื่อมต่อPAIRING

กดที่สวิตช์เปิดบนจอmonitor และตัวหุ่น จนกระทั่งได้ยินเสียงบีบสองครั้ง และไฟที่ "TORSO" เปลี่ยนเป็นสีเขียว PRACTI-MAN PLUS พร้อมใช้งาน สำหรับการฝึกซ้อม

⚠ เมื่อเปิดสวิตช์monitor คำเริ่มต้นจะเปิดใช้งานในโหมดผู้ใหญ่เสมอ

การทำงาน(ฟังก์ชัน)เพิ่มเติม

โหมดผู้ใหญ่-เด็ก
 คุณสามารถเลือกโหมดมาตรฐานหรือโหมดblind(ปิดไฟ) สำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก โดยการใช้การแสวงไฟคทหรือไฟกระพริบ

โหมดมาตรฐาน
 ผู้ใหญ่
 เด็ก

โหมดblind(ปิดไฟ)
 ผู้ใหญ่
 เด็ก

กดปุ่ม เลือกจนกว่า จะได้รับแสวงไฟคทที่ ตามตัวเลือกที่คุณต้องการ (ผู้ใหญ่-เด็ก)

กดปุ่ม เลือกจนกว่า จะได้รับแสวงไฟกระพริบตามตัวเลือกที่คุณต้องการ (ผู้ใหญ่-เด็ก)

⚠ ในโหมดblind(ปิดไฟ) จะไม่แสดงผลfeedback ในระหว่างการฝึก อย่างไรก็ตาม10วินาทีหลังจากการฝึกเสร็จสิ้น คุณสามารถดูรายงานการทดสอบได้เช่นเดียวกับในโหมดมาตรฐาน