


Jia Jab (Tube Holder)



ใส่ท่อช่วยหายใจและตรวจสอบ
ตำแหน่งให้เรียบร้อยเรียบร้อย



จัด tube holder ตามรูป
โดยให้ด้านที่ขมอยู่ที่มุม

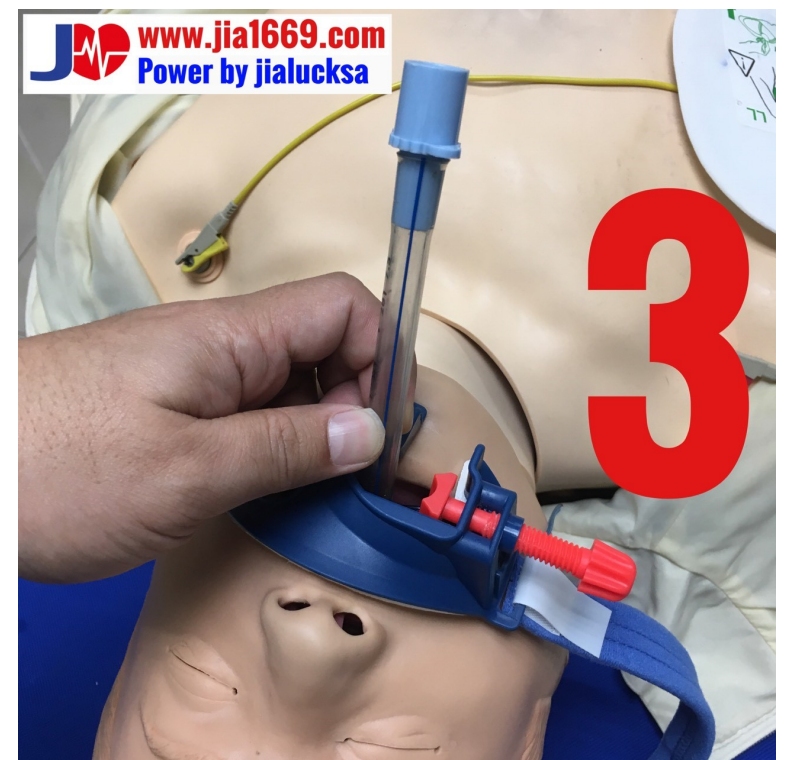

ใส่ tube holder เข้าในปาก
พร้อมจัดตำแหน่งตามรูป




หมุนเกลียวสีแดง ให้ท่อช่วยหายใจ
ยึดติดกับ tube holder
ให้แน่นสนิท วางไว้กลางปาก



จับแถบสีแดง ลอดใต้คอผู้ป่วย
(โดยไม่ต้องยกคอขึ้น)



นำแถบสีแดงที่ลอดใต้คอมาแล้ว
สอดเข้าอีกด้านของ tube holder

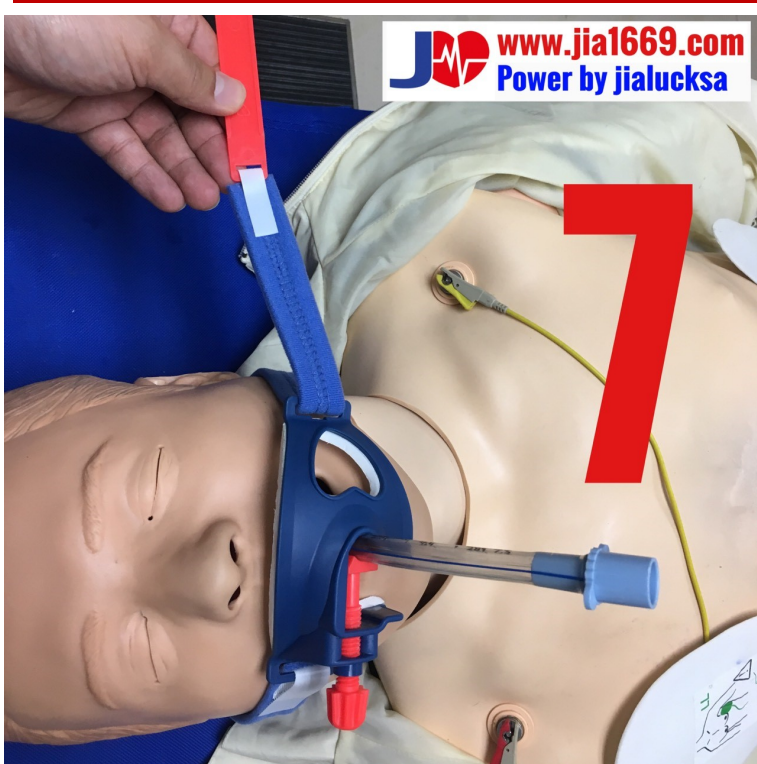

จัดสายรัด ให้เรียบร้อย โดยให้อยู่ใต้
ใบหู แล้ว รัดให้แน่นแนบสนิท



แกะแถบสีแดงออก และ พร้อม
ประเมินผู้ป่วยต่อเนื่อง.



โดย anti bite อยู่ในปากผู้ป่วย**
ตรวจสอบ ระวัง ริมฝีปากถูก ฟัน
และ anti bite กดทับ

ข้อบ่งชี้

#ออกแบบมาเพื่อยึดทางเดินหายใจ
ชั้นสูง เช่น Endotracheal Tubes
(ETs), Laryngeal Mask Airways
(LMAs) และ Supraglottic Airway
(SGAs) อื่นๆ #ใช้กับผู้ป่วยอายุตั้งแต่
8ปี ขึ้นไป #ควรใช้ในระยะเวลาสั้นๆ

คำเตือน

#ควรทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด #ชั้นท่อช่วยหายใจให้แน่นพอยึดได้
#ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี #ควรใช้ครั้งเดียว ไม่ควรใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อน ติดเชื้อ จากคนสู่คน และ จะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของ
เครื่องมือลดลง ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบเมื่อมีการใช้ซ้ำ #ควรตรวจสอบ
เครื่องมือก่อนการใช้งานทุกครั้ง #ควรติดตามอาการ ผู้ป่วยขณะใช้เครื่องมืออยู่

ข้อระวัง

ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
ใช้หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว
เท่านั้น
ไม่แนะนำให้หามาซื้อและใช้ซ้ำ