


1. ชั้นแรกดึง NRV ออกจากถุงช่วยหายใจ



2. เปิดฝาครอบวาล์วด้านล่าง

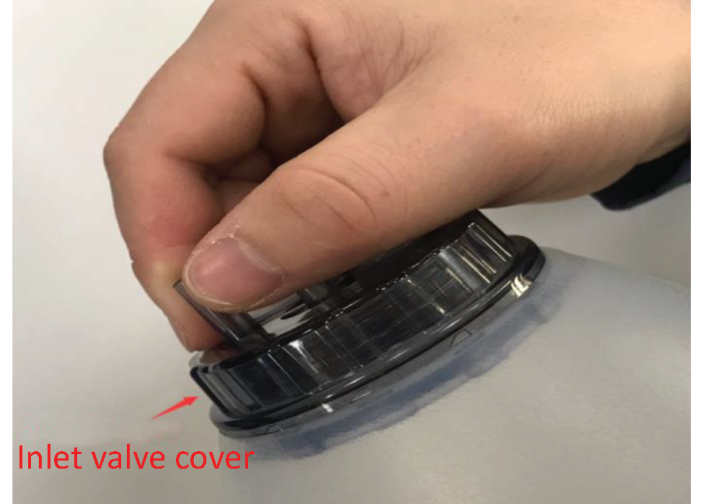

3. ถอดวาล์วด้านล่างออก



4. ใส่ชิ้นส่วนทั้งหมดลงในภาชนะเพื่อฆ่าเชื้อ

หมายเหตุ : 1. ถุงเก็บน้ำ ท่อออกซิเจน ที่เปิดปาก และทางเดินหายใจ เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง

2. เมื่อฆ่าเชื้อถุงช่วยหายใจโดยใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

- เวลาในการฆ่าเชื้อคือ 15 นาที เมื่อตั้งอุณหภูมิเป็น 121 องศาเซลเซียส
- เวลาในการฆ่าเชื้อคือ 5 นาที เมื่อตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 134 องศาเซลเซียส
- อุปกรณ์สามารถฆ่าเชื้อได้ 20 ครั้งเป็นส่วนใหญ่