



**ชุดPracti-man plus ประกอบด้วย**

หุ้บ 1 ตัว, จอมonitor 1 เครื่อง, คู่มือ 1 เล่ม, ปอดเทียม 5 ชิ้น, valve 2 อัน, แบตเตอรี่9V 2 ก้อน, คลิปล็อคคอหุ้บ 2 อัน, กระเป๋าใส่หุ้บ 1 ใบ

**เงื่อนไขการรับประกันสินค้า**

1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของเรียมริชชา และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อก่อนนำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการแล้วตั้งรับของเรียมริชชา หรือศูนย์บริการของเรียมริชชา เองโดยตรง
3. โดยภายใน 5 วันทำการ จะส่งอุปกรณ์สำรองไปให้ก่อน จนกว่าซ่อมอุปกรณ์เก่าเรียบร้อยแล้ว
4. กรุณาบริบอุปกรณ์ คืนภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งรับอุปกรณ์ มิฉะนั้นแล้วเรียมริชชาถือว่ายอมรับอุปกรณ์ให้สถานศึกษาหรือสาธารณสุข ตามที่เรียมริชชาเห็นสมควร
5. ช่วงเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับอุปกรณ์
6. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเสียหายโดยมีสาเหตุจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ การตกหล่น ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  - 6.2 ผลิตภัณฑ์ถูกกัด ไท่: ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของเรียมริชชา หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรียมริชชา และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของเรียมริชชา
  - 6.3 ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
  - 6.4.การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part)
  - 6.5.การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นมาใช้ร่วม รวมไปถึง เลข serial number จาวลหรือหายไป
7. เรียมริชชา จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หากมีการขัดข้อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาตามปกติ เรียมริชชา สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริการและค่าอะไหล่

**รายละเอียดการรับประกัน**

ชนิดของสินค้า	หมายเลขเครื่อง(SerialNumber)	วันที่เริ่มรับประกัน
วันสิ้นสุดรับประกัน	ชื่อผู้ซื้อ	ที่อยู่
	โทรศัพท์	E-mail
ชื่อจาก บริษัท เรียมริชชา จำกัด (สำนักงานใหญ่) *หมายเหตุ: โปรดแสดงใบรับประกันสินค้านี้ทุกครั้ง เมื่อนำสินค้าเข้ารับบริการในช่วงระยะเวลาประกัน		

# PRACTI-MAN

plus


การฝึกอบรมการทำ CPR ด้วยระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์



> **2 ใน 1**  
จำลองการฝึก CPR 2แบบ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ด้วยหุ้บตัวเดียว



> **Jaw thrust maneuver**  
ฝึกยกขากรรไกร เพื่อเปิดทางเดินหายใจ

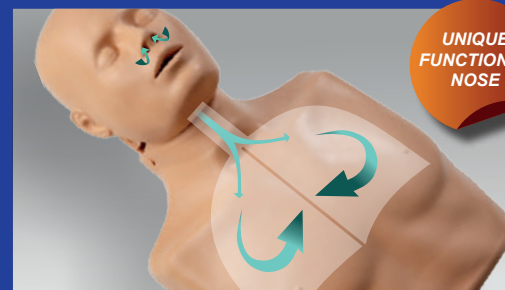

> **เลียนแบบ การหายใจเสมือนจริง**  
หลักการทำงาน เสมือนจามูกาจริง




> **ที่ล็อคคอหุ้บ**


บริษัท เรียมริชชา จำกัด  
36/5 หมู่ 7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130  
Facebook : JiACPR Tel. 0909791212





## การประกอบหุ่น


## คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อโรค


- 1 


สอดพื้ช่วงลำตัวของหุ่น
- 2 


สอดพื้ส่วนหน้าของหุ่น
- 3 


วางส่วนหัวหุ่น บนตำแหน่งข้อต่อให้ลงล็อกเข้ากับคอหุ่น
- 4 

สอดถุงปลอดลดขารไรโร เข้าไปในช่องปาก
- 5 

ต่อปลอกเข้ากับvalveส่วนปาก
- 6 

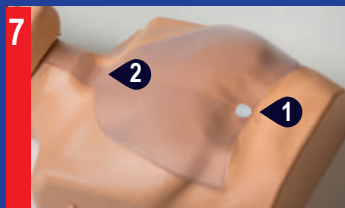กดส่วนปากให้ลงตำแหน่งพอดีบนหัวหุ่น
- 7 

จัดแผ่นปลอดบนหน้าอก  
- ติดสติ๊กเกอร์ขอรปิด ตรงตำแหน่งวงกลม  
- จัดปลอกให้วางอยู่อย่างหลวมๆ ตรงคอหุ่น
- 8 

ประกอบส่วนพื้หน้า เข้ากับหัวหุ่น เช็คนตำแหน่งจมูก, ปาก ให้ลงร่องพอดี
- 9 

ประกอบพื้ช่วงลำตัวหุ่น


เพื่อความสะดวกและสุขอนามัยสูงสุด พู่ผลิตแนะนำให้ทำความสะอาด Practi-Man Plus ทุกครั้งหลังจากใช้งานแต่ละครั้งตามคำแนะนำด้านล่าง



ทำความสะอาดหุ่นฝึก หลังการฝึกแต่ละครั้ง โดยถอดพื้หน้าออกจากส่วนหัวของหุ่น เช็ดทำความสะอาดส่วนริมฝีปากและใบหน้า



เพื่อให้ทำความสะอาดได้ดีขึ้น วางส่วนพื้หน้าลงในภาชนะที่ใส่น้ำหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดแล้วพื้ให้แห้ง

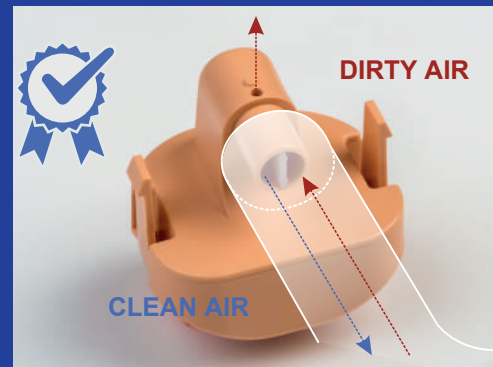


หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดส่วนvalve แล้วปล่อยให้แห้ง



แผ่นปลอดของหุ่น สามารถใช้งานฝึกอบรบกลุ่มคนได้หลายครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้ง  
ถ้าขุ่นเปื้อน เป่าปลอกแล้วถุงปลอดไม่เปื้อน ให้เช็ดดูความชื้นภายในถุงปลอด ถ้าไม่ชื้น ให้เปลี่ยนถุงปลอดอันใหม่

### การป้องกันระหว่างการฝึกซ้อม

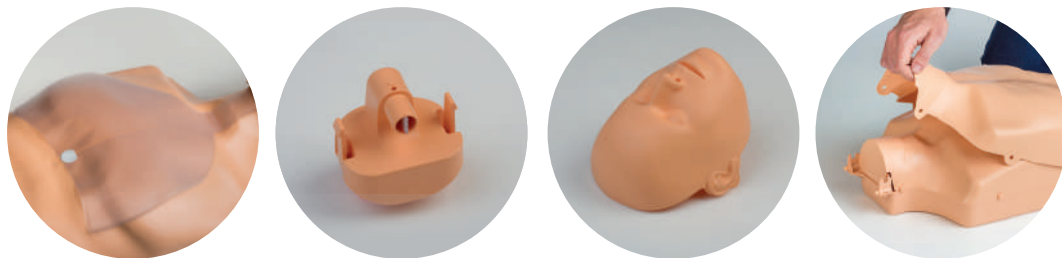

ควรใช้แผ่น face shield ขณะฝึก เพื่อสุขอนามัยสูงสุด ก่อนทำการเป่าปาก

