

คุณสมบัติที่สำคัญและการใช้งาน



ประกอบด้วย


1. หุ่นสเปเด็ก PRACTI-BABY 2. คู่มือการใช้งาน 3. ถุงปอด 4. กระเป๋ใส่หุ่น

เมื่อไรที่ควรรับประกันสินค้า

1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของไควร์ริคคา และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อนำมาซ่อมที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือศูนย์บริการของบริษัท เอมโดยตรง
3. โดยภายใน 5 วันทำการ จะส่งอุปกรณ์สำรองไปให้ก่อน จนกว่าซ่อมอุปกรณ์ตัวที่เสียเรียบร้อยแล้ว
4. กรุณารับอุปกรณ์ คืนภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับอุปกรณ์ มิฉะนั้นแล้วบริษัทถือว่ายินยอมบริจาคอุปกรณ์ให้สถานศึกษาหรือสาธารณกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
5. ช่วงเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับอุปกรณ์
6. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเสียหายโดยมิสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ การตกหล่น ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 - 6.2 ผลิตภัณฑ์ถูกดัด แก้ไข เปลี่ยน และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัท หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของบริษัท
 - 6.3 ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แร่ดิน ไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
 - 6.4 การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part)
 - 6.5 การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกับการใช้งานผิดประเภท การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นมาใช้ร่วม รวมไปถึง เลข serial number าวลงหรือหายไป
7. บริษัท จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หากมีการขัดข้อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาตามปกติ บริษัท สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริการและค่าอะไหล่



➤ เป็นหุ่น เรียนแบบเด็กทารก ทั้งขนาด, น้ำหนัก, และการเคลื่อนไหว เพื่อใช้ฝึกซ้อมการบีบหัวใจในการช่วยชีวิตเด็กทารก

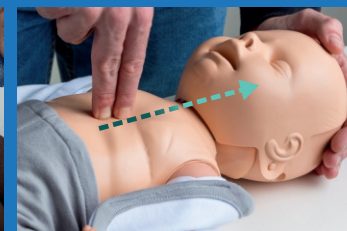


ฝึกการช่วยหายใจ

➤ ฝึกขั้นตอนที่เหมาะสมในการช่วยชีวิตเด็ก ➤ ส่วนหัวของหุ่นขยับไปมาได้ เพื่อฝึกการจัดท่าเด็กขณะช่วยหายใจ

ปุ่มปรับเสียง

เป็นตัวเลือกในการฝึกซ้อมให้มี/ไม่มีเสียงคลิก

OTHER ADVANTAGES OF PRACTI-BABY

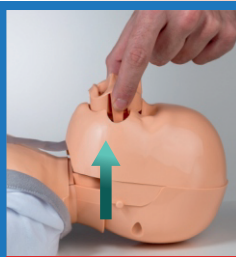

ฝึกการเปิดทางเดินหายใจ

➤ หายใจ โดยใช้ oral airway ทำโดย นำส่วน valve ของปากหุ่นออก เหลือแต่ส่วนซิลิโคนพิวหน้า แล้วฝึกใส่ oral airway

ฝึกการใช้เครื่องฝึกซ้อม AED

โดยมีทั้งรอยเขียนบนผิวหนังหุ่น

รายละเอียดการรับประกัน

ชนิดของสินค้า _____	หมายเลขเครื่อง (Serial Number) _____	วันที่เริ่มรับประกัน _____
วันสิ้นสุดรับประกัน _____	ชื่อผู้ซื้อ _____	ที่อยู่ _____
_____	โทรศัพท์ _____	E-mail _____

ชื่อจาก บริษัท ไควร์ริคคา จำกัด (สำนักงานใหญ่) *หมายเหตุ: โปรดแสดงใบรับประกันสินค้านี้ทุกครั้ง เมื่อนำสินค้าเข้ารับบริการในช่วงระยะรับประกัน

บริษัท ไควร์ริคคา จำกัด

36/5 หมู่ 7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

Facebook : JiACPR Tel. 0909791212





1 กอดแผ่นซิลิโคนตรงผิวหน้า



2 กอดแผ่นซิลิโคนตรงผิวหน้า



3 สอดตุบอดเข้าไปใต้ขากรรไกร



4 เชื่อมต่อตุบอดเข้ากับส่วนvalveปาก



5 กอดส่วนvalveปาก ให้มัลล็อกกับส่วนหัวของเด็ก



6 ติดสติ๊กเกอร์ที่ตุบอดบนตัวหุ่น




7 ใส่ผิวซิลิโคนส่วนหน้า เข้าตรงหัวหุ่น โดยใส่ส่วนปากและจุ่มกให้เข้าไปในรูตามตำแหน่งให้ถูกต้อง



8 ใส่ผิวซิลิโคนส่วนนอกเข้าบนตัวหุ่น

ชิ้นส่วนประกอบของหุ่นเด็ก

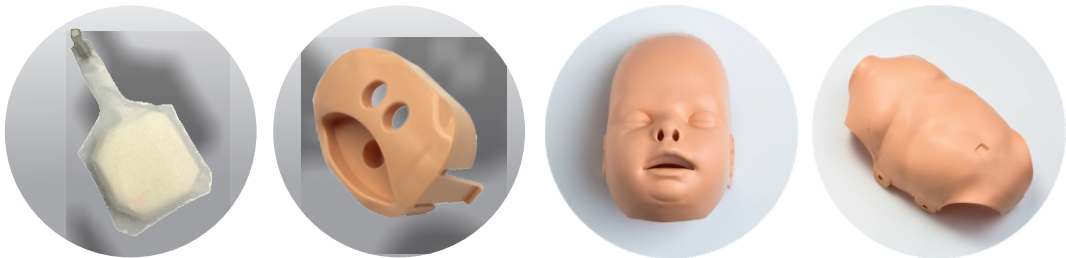

หลังจบการฝึกอบรม ให้ถอดซิลิโคนส่วนหน้ามาเช็ดทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ กับบริเวณปากและใบหน้า



สามารถนำผิวซิลิโคนส่วนหน้า เช็ดในน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดและผึ่งให้แห้ง



หลังฝึกอบรม เช็ดฆ่าเชื้อ ส่วนvalveปาก และปล่อยให้แห้ง



หากเป่าลมเข้าแล้ว ตุบอดไม่เป่าพอง ให้เช็คดูความชื้นภายในตุบอดก่อน สามารถเปลี่ยนกรณีตุบอดแห้งดี แต่เป่าลมไม่ขึ้น

การป้องกันระหว่างการฝึกซ้อม



ควรใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจขณะฝึกซ้อม



ควรใช้แผ่นช่วยหายใจ face shield ขณะฝึกซ้อม



ควรใช้แผ่นซุบแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดหุ่นขณะฝึกซ้อม