



Peter Mediphar Co., Ltd.

COVID-19 Antigen Rapid Test

ชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง

For patients suspected of current COVID-19 infection



ISO 13485

reOpenTest



COVG10G **1 Test kit / Box**



COVG10X **5 Test kits / Box**




COVG10S **25 Test kits / Box**

วิธีการใช้งาน

- ✓ เก็บตัวอย่างจากช่องจมูก
- ✓ ทราบผลใน 15 นาที
- ✓ ความแม่นยำสูง 97.52%
- ✓ ความจำเพาะสูง 99.13%


Self-test kit

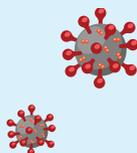


5x



Use Anterior Nasal Swab

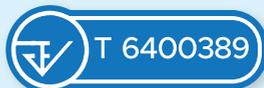

ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Marked

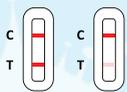

Positive



Negative



Invalid

Recommended In Europe



Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Test-ID: AT102/20

BfArM Listed

Paul-Ehrlich-Institut



Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

P.E.I. Listed

Approved Authorities :



EU (HSC Common List)



Germany (BfArM-PEI)



Hungary



Belgium



Spain

นำเข้าโดย บริษัท สมาร์ท โซนซ์ จำกัด
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ปีเตอร์ เมดิฟาร์ จำกัด

LINE ADD FRIEND



ชุดตรวจผ่านการรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใรับรองการประเมินที่ T 6400389

www.petermediphar.com



@petermed



02-077-7593

098-8250970, 087-8306909

ชุดตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยใช้ตัวอย่างจากหน้าโพรงจมูก





วิธีใช้สารคดีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

reOpen Test



⚠️ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดตรวจมีส่วนประกอบครบทั้งหมด

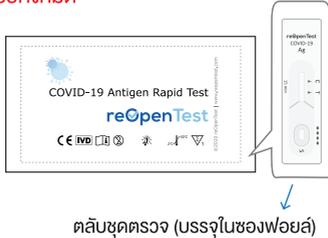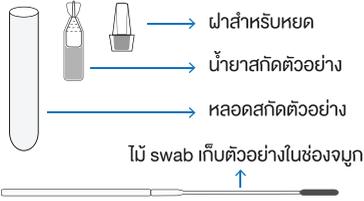

ตลับชุดตรวจ (บรรจุในซองฟอยล์)

ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ



อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น : นาฬิกาจับเวลา



เปิดซองกันเก็บตัวอย่าง นำก้านเก็บตัวอย่างออกมา

⚠️ ห้ามจับหรือกดด้านที่เป็นสำลี



เอียงศีรษะไปด้านหลัง แล้วใช้ไม้ swab แหย่เข้าไปในรูจมูกจนสุด (ลึกประมาณ 1.5-2.5 ซม.)




หมุนไม้ swab ไปรอบๆโพรงจมูกอย่างน้อย 5 รอบ หรือมากกว่านั้น เป็นเวลา 15 วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตัวอย่างดี ไม้ swab ออก และทำซ้ำกับจมูกอีกด้าน **⚠️ ต้อง swab ในโพรงจมูกทั้งสองข้าง หากรู้สึกกระคายเคือง ให้ทำจมูกอีกข้าง**

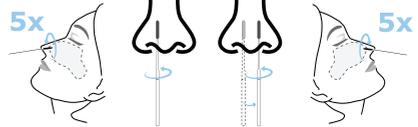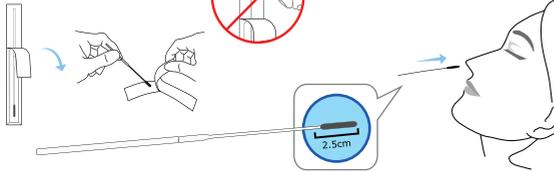

หมุนฝาด้านบนของหลอดบรรจุน้ำยาสกัด แล้วหยดน้ำยาทั้งหมด (ประมาณ 400 ไมโครลิตร) ลงในหลอดสกัดตัวอย่าง

จุ่มไม้ swab ที่เก็บตัวอย่าง แล้วลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัดหมุนและบีบอย่างน้อย 15 ครั้ง จากนั้นบีบน้ำยาออกจากไม้โดยใช้มือบีบหลอดสกัดจากด้านบนออก

หักไม้ swab ตรงจุดหักที่กำหนดไว้ และปิดฝาด้านบน แช่ไม้ swab ส่วนที่เหลือในหลอดสกัดประมาณ 1 นาที

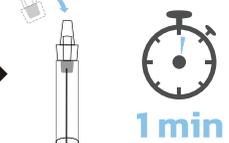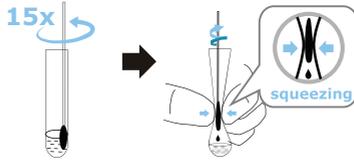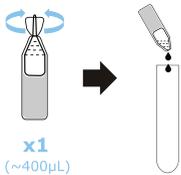


กลับหลอดสกัดเอาด้านฝา ลงด้านล่าง และหยดตัวอย่างซ้ำ ลงในหลอดทดสอบ "S" จำนวน 4 หยด (หรือประมาณ 100 ไมโครลิตร) และเริ่มจับเวลา




⚠️ ข้อควรระวัง: ระงับการเกิดฟอง เมื่อหยดตัวอย่างในหลอดทดสอบ และห้ามกดตัวอย่างลงตลับชุดตรวจ


⚠️ ห้ามอ่านผลหลังจาก 20 นาที

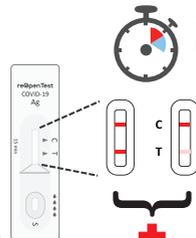

ผลบวก ติดเชื้อโควิด-19

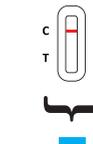

ผลลบ ไม่ติดเชื้อโควิด-19

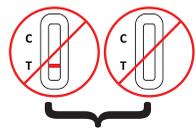

ทำการทดสอบใหม่