




Mode

- CPAP โหมดปล่อยแรงดันคงที่
- AutoSet FH โหมดปล่อยแรงดันอัตโนมัติโดยเครื่องมี algorithm ที่คำนวณจาก 1 ามหายใจหากเกิดภาวะหยุดหายใจหรือภาวะหายใจแผ่วเบาเครื่องจะปล่อยแรงดันรักษา โดยจะค่อยๆปล่อยแรงดันแรงดันจะค่อยๆเปลี่ยนและนุ่มนวล เพื่อป้องกันการตื่นระหว่างคืน

AirSense 10 AutoSet For Her

คุณสมบัติ/Specifications

- เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกแบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Auto CPAP) ตั้งแรงดันได้ช่วง 4-20 cmH2O
- มีระบบ SmartStart การทำงานของเครื่องแบบอัตโนมัติ เมื่อใส่/ถอดหน้ากาก
- หน้าจอ LED สี ปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติ ตามแสงภายในห้อง
- มีฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงดันขณะหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR) สูงสุด 3 cmH2O
- มีสัญลักษณ์แสดงความกระชับของการใส่หน้ากาก (Mask Seal)
- รายงานการนอน ระบุ Usage, Leak, Pressure, AI, HI, AHI, Cheyne-Stokes respiration, Hypopnoea, Central, Obstructive)
- รองรับการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless module) ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 3G/4G
- ขนาดเครื่อง CPAP สูง 116 mm x ยาว 255 mm x กว้าง 150 mm
- น้ำหนักเครื่อง CPAP 1284 กรัม
- ระดับเสียงการทำงานของเครื่อง 26.6 เดซิเบล
- เครื่องทำความชื้นมาพร้อมกับเครื่อง CPAP (HumidAir Cleanable)
- Ramp Time ระบบตั้งเวลาหน่วง ตั้งแต่ ปิด, 5 ถึง 45 นาที หรืออัตโนมัติ

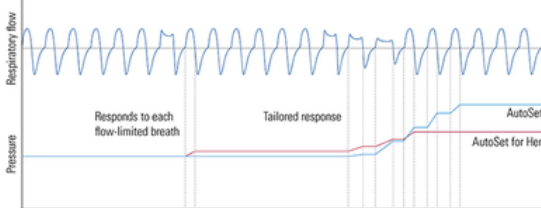

การติดตั้ง

- วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มีระดับที่มั่นคง
- เสียบขั้วต่อสายไฟที่ด้านหลังของอุปกรณ์ เชื่อมต่อปลั๊กสายไฟ ด้านหนึ่งเข้ากับหน่วยจ่ายไฟ และปลั๊กอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- ต่อท่อลมเข้ากับช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของอุปกรณ์อย่างแน่นหนา
- ต่อปลายท่อลมที่วางเข้ากับหน้ากากที่ประกอบแล้วให้แน่น
- ใส่น้ำกลั่นทางการแพทย์ในกระบอกใส่น้ำแล้วใส่เครื่องให้แบบสมนึก
- กด Start/Stop เพื่อเริ่มการใช้งาน หรือ หายใจเข้า ออก เมื่อเปิดเมนู Auto Start

อุปกรณ์ที่ได้รับ

- เครื่อง Auto CPAP พร้อมเครื่องทำความชื้นแบบติดตั้งมากับเครื่อง
- กล้องใส่น้ำทำความชื้น (HumidAir Cleanable)
- ท่อลมแบบ ClimateLine ภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 90W)
- กระเป๋าใส่เครื่อง (Travel bag)
- แผ่นกรองแบบ Standard
- SD Card สำหรับบันทึกข้อมูล
- คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (User Manual EN/TH)



การอ่านผลที่หน้าเครื่อง

- เช้าดู Report การนอนได้ที่ เมนู Sleep Report



หมายเหตุ : อ่านค่าเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์