


ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง



ชุดตรวจโควิด-19
แบบตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง

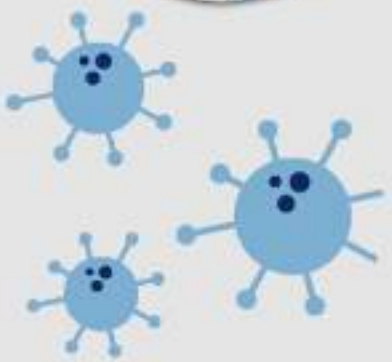

ขนาดบรรจุ 1 ชุด



RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD

SARS-CoV-2 Antigen Qualitative Rapid Test For In Vitro Diagnostic Use

An immunochromatographic assay for the rapid qualitative detection of SARS-CoV-2 virus antigen using saliva specimens.

ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีตรวจน้ำลาย (Saliva specimen)

ใช้สำหรับการประเมินเชิงคุณภาพของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
แบบแอนติเจนในตัวอย่างน้ำลายใช้ง่ายทั้งเด็กและผู้สูงอายุ

- ✓ รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้
- ✓ มีทะเบียน ถูกต้อง
- ✓ ตรวจง่าย อ่านผลไว

- ✓ ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
โดย คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



แนะนำการใช้งาน
สแกน
QR Code
แบบน้ำลาย



Saliva PCR Covid-19 test



TOP BRAND AWARDS 2017
TOP BRAND AWARDS 2021
BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2016
BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2021

จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เลขที่ กก. สน. 192/2563
ISO9001 : 2015

บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ (Home Use)

T 6400436

ขนาดบรรจุ 1 ชุด



ส่วนประกอบของชุดทดสอบ


1. ตลับทดสอบ
2. กรวยเก็บน้ำลาย
3. หลอดเก็บตัวอย่าง
4. หลอดสารสกัด
5. คู่มือการใช้งาน
6. ซองกึ่งอุปกรณ์ BIO SAFETY BAG



ชุดตรวจโควิด-19
แบบตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง

ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีตรวจน้ำลาย (Saliva specimen)

กรุณาอ่านคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มทำการทดสอบ

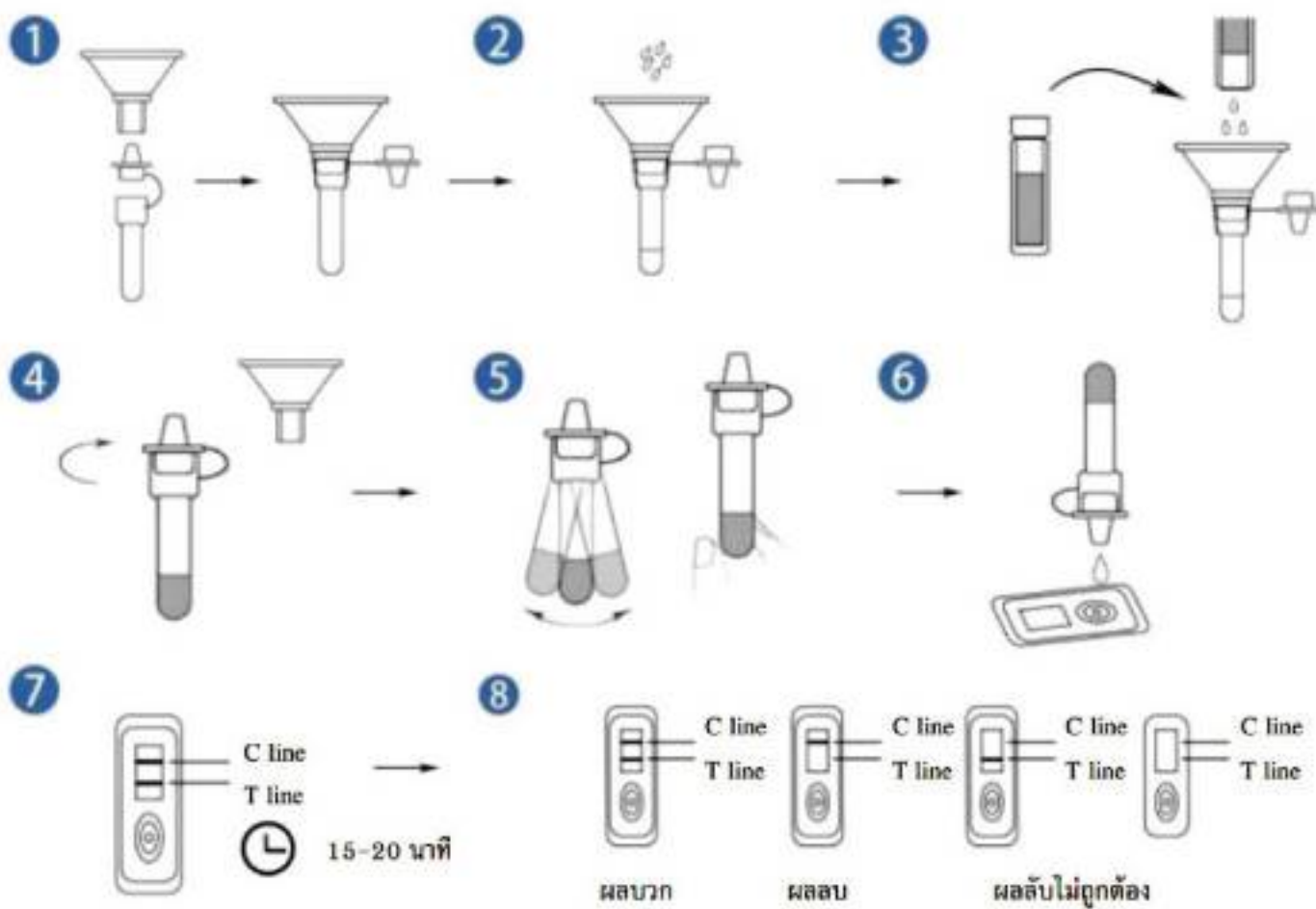

1. ประกอบส่วนของกรวยเก็บน้ำลายเข้ากับส่วนของหลอดสกัดแอนติเจนเพื่อเก็บน้ำลาย
2. เก็บน้ำลาย โดยปริมาตรของน้ำลายจะต้องเท่ากับ / ของหลอดสกัดแอนติเจน (ประมาณ 300 ไมโครลิตร)
3. เทน้ำยาสกัดแอนติเจนลงในหลอดสกัดแอนติเจน
4. กอดกรวยเก็บน้ำลายและปิดฝาหลอดสกัดแอนติเจน
5. เขย่าหลอดสกัดแอนติเจนสามครั้งอย่างแรง แล้วบิบหลอดสกัดแอนติเจน 10 ครั้งเพื่อให้ น้ำยาสกัดแอนติเจนและตัวอย่างเข้ากัน
6. คว้าหลอดสกัดแอนติเจนเพื่อหยดน้ำยาสกัดแอนติเจนจำนวน 3 หยดลงในช่องตัวอย่าง (S) อย่างช้าๆ
7. จับเวลา 15-20 นาที และอ่านผล
หมายเหตุ: ผลหลังจาก 20 นาทีอาจไม่ถูกต้อง
8. แปลผลการทดสอบ

ระบบเก็บประวัติ
การตรวจโควิด-19

ใช้งานฟรี!
Free!
to use



✓ ใช้งานง่ายทุกที่
ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียนแล้วใช้งานได้ทันที

HIPBIotech
Connect
hipbiotech.com/helpcare

✓ เก็บประวัติต่อเนื่อง
เปิดดูประวัติการตรวจย้อนหลังได้
พร้อมทั้งออกใบยืนยันผล (PDF)

✓ สามารถเก็บข้อมูลแบบองค์กร
เพื่อสะดวกในการติดตามประวัติรายบุคคล



เริ่มใช้งานเลย!



YouTube



T01

1:1
บรรจุกล่อง 250 Test
ขนาดกล่อง 62x40x27CM
ขนาดกล่อง 19x5x2.4CM



สอบถามข้อมูลการใช้งาน

@hipbiotech

24 hrs online

พร้อมสามารถลงทะเบียนบันทึกการตรวจ



แบบฟอร์มใช้งาน
สแกน
QR Code
แนบนำลาย



ข้อแนะนำการใช้งาน:

- บุคคลที่ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและ:
- สาธารณสุข และหรือคลินิกประจำบ้าน
- ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น โดยหากมีผลตรวจของโควิด 19
- ปริมาณน้อย อาจใช้ผลเบื้องต้นได้
- ใช้งานโดยไม่มีการเอาตัวในการตรวจโควิด 19 โดย ทางการแพทย์แนะนำให้
- ใช้ 10-15 นาที ทดสอบทันที
- ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของโควิด-19
- วันเดือนปีเกิดกับชื่อและนามสกุล ผู้ใช้งาน

บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ (Home Use)

T 6400436