


## ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

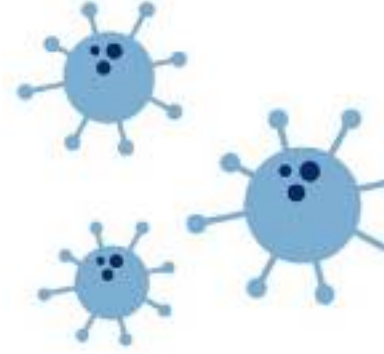

**ชุดตรวจโควิด-19  
แบบตรวจหาแอนติเจน  
ด้วยตนเอง**



### RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD

SARS-CoV-2 Antigen Qualitative Rapid Test For In Vitro Diagnostic Use  
An immunochromatographic assay for the rapid qualitative detection of SARS-CoV-2 virus antigen using saliva specimens.

**ขนาดบรรจุ  
1 กล่องต่อ 20 ชุด**

## ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีตรวจน้ำลาย (Saliva specimen)

ใช้สำหรับการประเมินเชิงคุณภาพของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19  
แบบแอนติเจนในตัวอย่างน้ำลายใช้ง่ายทั้งเด็กและผู้สูงอายุ

- ✓ รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้
- ✓ มีทะเบียน ถูกต้อง
- ✓ ตรวจง่าย อ่านผลไว
- ✓ ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพ โดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Sensitivity  
**95.00%**

แนะนำการใช้งาน  
สแกน  
QR Code  
แบบน้ำลาย



**Saliva PCR Covid-19 test**



TOP BRAND AWARDS 2017  
TOP BRAND AWARDS 2021  
BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2016  
BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2021

จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์  
กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
เลขที่ กท. สน. 192/2563  
ISO9001 : 2015

**บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ (Home Use)**

**T 6400436**

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันที่ผลิตที่ข้างกล่อง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ



## ส่วนประกอบของชุดทดสอบ

1. ตลับทดสอบ
2. กรวยเก็บน้ำลาย
3. หลอดเก็บตัวอย่าง
4. หลอดสารสกัด
5. คู่มือการใช้งาน
6. ช่องกึ่งอุปกรณ์ BIO SAFETY BAG




ชุดตรวจโควิด-19  
แบบตรวจหาแอนติเจน  
ด้วยตนเอง

ขนาดบรรจุ  
1 กล่องต่อ 20 ชุด

## ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีตรวจน้ำลาย (Saliva specimen)

กรุณาอ่านคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มทำการทดสอบ

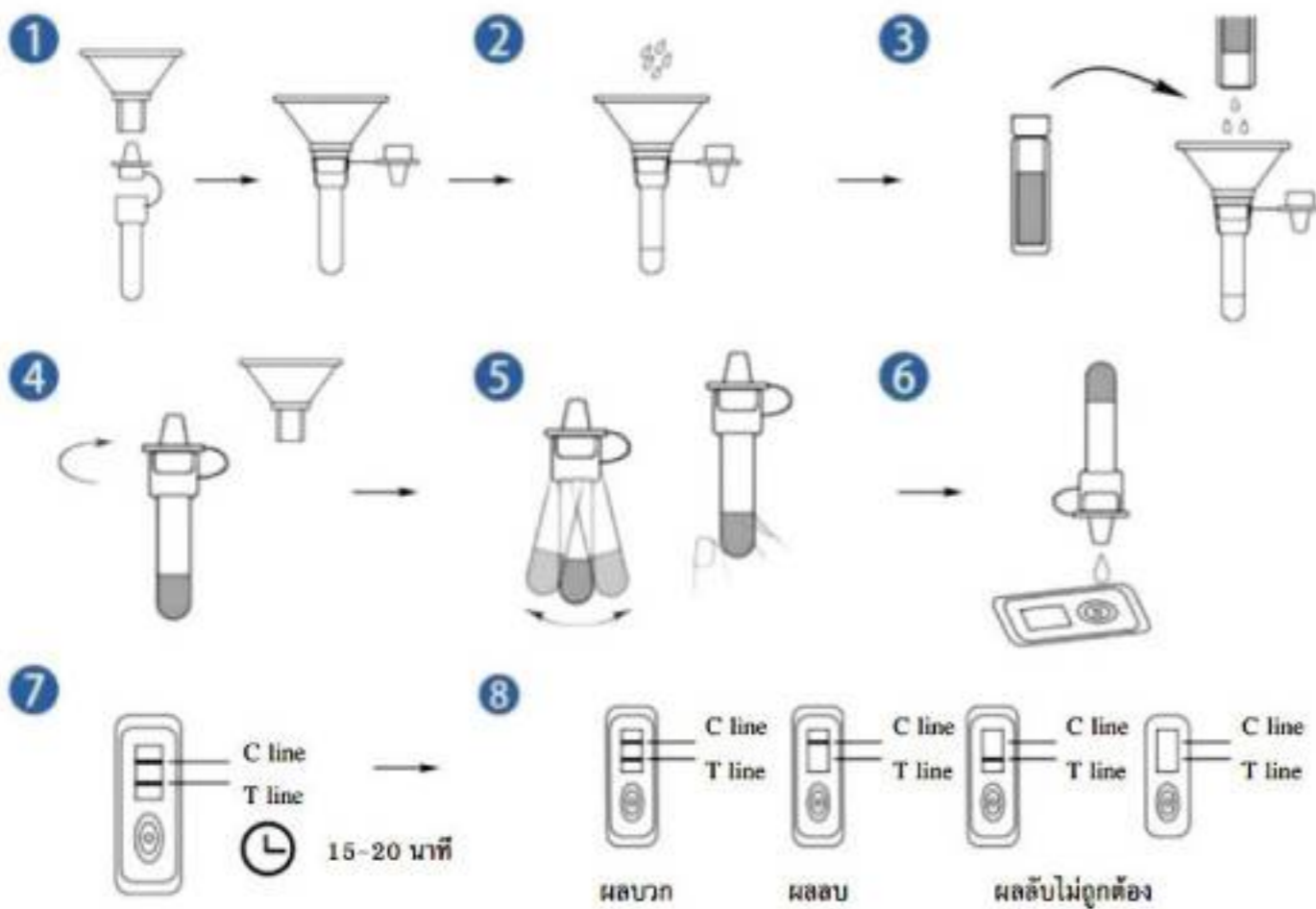

1. ประกอบส่วนของกรวยเก็บน้ำลายเข้ากับส่วนของหลอดสกัดแอนติเจนเพื่อเก็บน้ำลาย
2. เก็บน้ำลาย โดยปริมาตรของน้ำลายจะต้องเท่ากับ / ขອງหลอดสกัดแอนติเจน (ประมาณ 300 ไมโครลิตร)
3. เทน้ำยาสกัดแอนติเจนลงในหลอดสกัดแอนติเจน
4. กอดกรวยเก็บน้ำลายและปิดฝาหลอดสกัดแอนติเจน
5. เขย่าหลอดสกัดแอนติเจนสามครั้งอย่างแรง แล้วบีบหลอดสกัดแอนติเจน 10 ครั้งเพื่อให้ น้ำยาสกัดแอนติเจนและตัวอย่างเข้ากัน
6. คว้าหลอดสกัดแอนติเจนเพื่อหยดน้ำยาสกัดแอนติเจนจำนวน 3 หยดลงในช่องตัวอย่าง (S) อย่างช้าๆ
7. จิบเวลา 15-20 นาที และอ่านผล  
หมายเหตุ: ผลหลังจาก 20 นาทีอาจไม่ถูกต้อง
8. แปลผลการทดสอบ

ระบบเก็บประวัติ  
การตรวจโควิด-19

ใช้งานฟรี!  
Free!  
to use



✓ ใช้งานง่ายทุกที่  
ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน  
ลงทะเบียนแล้วใช้งานได้ทันที

HIPBIotech  
Connect  
hipbiotech.com/helpcare

✓ เก็บประวัติต่อเนื่อง  
เปิดดูประวัติการตรวจย้อนหลังได้  
พร้อมทั้งออกใบยืนยันผล (PDF)

✓ สามารถเก็บข้อมูลแบบองค์กร  
เพื่อสะดวกในการติดตามประวัติรายบุคคล



เริ่มใช้งานเลย!



YouTube



T20

1:20  
บรรจุกล่อง: 1,000 Tests  
ขนาดลัง 64.5x36.5x42.2CM  
ขนาดกล่อง 17.5x12.6x7.2CM



สอบถามข้อมูลการใช้งาน

@hipbiotech

24 hrs online

พร้อมสามารถลงทะเบียนบันทึกการตรวจ



แบบภาพใช้งาน  
สแกน  
QR Code  
แบบน้ำลาย



คำแนะนำการใช้งาน:

- บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ภายใต้คำแนะนำของกรมการแพทย์และสาธารณสุข และหรือเชิงการประจำอำนาจยา
- ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น โดยหากมีผลตรวจของโควิด 19 เป็นบวกต้อง ย่างใจหรือพบแพทย์
- ใช้งานภายใต้การกำกับดูแลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- อย่านำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคโควิด 19 ใต้ การรณรงค์ค้นหา
- ผลการตรวจนี้เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของโควิด-19
- 5.ห้ามเปิดเผยถึงผลตรวจแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ (Home Use)

T 6400436