 <p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์</p> <p>โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม</p>	<p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</p>		<p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>WI-A&E02-002</p>
	<p>วิธีปฏิบัติงาน</p> <p>WORK INSTRUCTION</p>	<p>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00</p> <p>วันที่บังคับใช้ : 18/12/46</p>	<p>หน้า</p> <p>1/2</p>
<p>เรื่อง วิธีการทำความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์งานหน่วยเปลกลาง</p>			

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

2. ขอบเขต

ครอบคลุม การทำความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เปลตัก และ Pat slide ให้พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

3. นิยามศัพท์

3.1 อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เปลตัก และ Pat slide

3.2 การทำความสะอาดอุปกรณ์ หมายถึง เมื่ออุปกรณ์สกปรก หรือเปื้อนเลือดและสารคัดหลั่งให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและผงซักฟอก


3.3 การเตรียมอุปกรณ์ หมายถึง การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อมิให้เกิดปัญหาขณะใช้งาน


4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่เปลกลางมีหน้าที่ทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา

5. อุปกรณ์

- 5.1 กระดาษฟาง
- 5.2 ผงซักฟอก
- 5.3 น้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์
- 5.4 สก๊อตไบท์
- 5.5 ผ้า

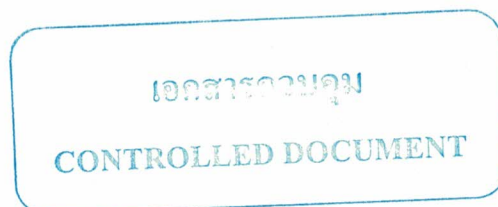

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL	หมายเลขเอกสาร WI-A&E02-002
	ระเบียบปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 18/12/46
เรื่อง วิธีการทำความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์งานหน่วยเปลกลาง		

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

6.1 การทำความสะอาดอุปกรณ์

6.1.1 ในกรณีที่อุปกรณ์เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งเช่น น้ำลาย อุจจาระ ให้ใช้กระดาษฟางเช็ดก่อน

6.1.2 ใช้น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ราดบริเวณที่เปื้อนและทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนล้างด้วยน้ำ และผึ่งซักฟอก หลังจากนั้นเช็ดให้แห้ง

6.2 การเตรียมอุปกรณ์

6.2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้พร้อม โดยตรวจสอบก่อนเข้าเวรและก่อนลงเวรทุกวัน วิธีการตรวจสอบ ดังนี้

6.2.1.1 รถเข็นนั่งและนอน คุณภาพรถทั่ว ๆ ไป เช่น ล้อรถ ล้อคล้อ พนักพิงที่วางเท้า ไม่มีรอยหัก หรือชำรุด ล้อรถไม่มีสนิม สามารถวิ่งได้ดี

6.2.1.2 เปลตัก ไม่มีสนิม ไม่หัก และล้อคใช้การได้ดี

6.2.1.3 Pat slide ไม่มีรอยหัก หรือรอยแยก

6.2.2 ถ้าพบว่าอุปกรณ์มีชำรุดให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ (QP-MEW-01)

7. เอกสารอ้างอิง

7.1 ระเบียบปฏิบัติงาน

7.1.1 การซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ QP-MEW - 01

7.1.2 การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ QP-IC-01

8. บันทึก

8.1 แบบฟอร์ม

- ไม่มี

8.2 เอกสารสนับสนุน

- ไม่มี

