





เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ  
จากประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร

WI-CAM01-009

วิธีปฏิบัติงาน

WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่บังคับใช้ : 4 ส.ค. 2547

หน้า

1/2

## เรื่อง วิธีการใช้และบำรุงรักษา Laryngoscope

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจได้ถูกต้อง
- 1.2 มีเครื่องมือพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ

### 2. ขอบเขต

-

### 3. นิยามศัพท์

-

### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ช่าง / เจ้าหน้าที่พยาบาล/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องมือ

### 5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

#### 5.1 ค้ามจับ (handle)

ตัวค้ามจับมีลักษณะเป็นท่อนคล้ายกระบองไฟฉายโลหะชุบโครเมียม ที่ปลายค้ามจับเป็นช่องสำหรับบรรจุแบตเตอรี่ ส่วนปลายด้านบนเป็นฐานรองรับ ซึ่งมีก้านสำหรับเกี่ยวกับตะขอของตัว blade โดยเมื่อประกอบ blade เข้ากับฐานที่จุดสัมผัสแล้ว fitting จะเป็นการเปิดสวิตช์ ทำให้กระแสไฟครบวงจร ส่งผลให้หลอดไฟที่ปลาย blade สว่าง

#### 5.2 Blade

มีรูปร่าง และขนาดต่างกัน ลักษณะคล้ายใบมีดมีปลายยาวเรียวมน คล้ายลิ้นสำหรับสอดเข้าไปในช่องปากและส่วนของใบมีดมีปีกยื่นออกมา เรียกว่า flunge สำหรับใช้ในการบิดลิ้น ส่วนปลายของ Blade เป็นหลอดไฟสำหรับให้ความสว่างในขณะที่ใส่ท่อช่วยหายใจ โดยไฟจะสว่างเมื่อเกี่ยวส่วนที่มีลักษณะคล้ายตะขอของ Blade ให้มีการสัมผัสกับฐานที่ตัวค้ามจับ blade ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มี 2 ชนิด คือ


5.2.1 blade โค้ง (Macintosh blade) ใช้ในผู้ป่วยคอสั้น หนา

5.2.2 blade ตรง (Miller blade) ใช้ในผู้ป่วยเด็ก

### 6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 6.1 ผู้ปฏิบัติจับ blade ด้วยมือซ้าย และถือตัวค้ามจับ (handle) ด้วยมือขวา
- 6.2 เอียงตัว blade ประมาณ 45 องศา เพื่อให้ตะขอเกี่ยวเข้ากับก้านของค้ามจับ
- 6.3 กด blade ลงจนตะขอเข้าได้สนิท กับตัวก้าน
- 6.4 ยกตัว blade ขึ้น จะทำให้ตัว blade ประกอบเข้าได้พอดีกับค้ามจับที่จุดสัมผัส และหลอดไฟที่ปลาย blade สว่างขึ้น
- 6.5 การแยกส่วนประกอบหลังเลิกใช้งาน
  - 6.5.1 กดตัว blade ลงในลักษณะเอียงทำมุมกับค้ามจับ
  - 6.5.2 ปลดให้ตะขอหลุดออกจากก้านของค้ามจับ จนแนวเอียง

เอกสารควบคุม  
CONTROLLED DOCUMENT

 <p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์</p> <p>เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ จากประชาชน</p>	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b>		หมายเลขเอกสาร <b>WI-CAM01-009</b>
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : - 4 ส.พ. 2547	หน้า 2/2
<b>เรื่อง วิธีการใช้และบำรุงรักษา Laryngoscope</b>			

## การดูแลรักษาและรักษาความสะอาดหลังใช้งาน

### 1. Blade

- 1.1 ล้างด้วยน้ำสบู่ ใช้แปรงทำความสะอาดทุกมุมเอาคราบเลือดและเสมหะออกให้หมด ห้ามนำ blade ไปแช่น้ำเนื่องจากจะทำให้สายไฟที่อยู่ชั้นยึดออกจนเสียใช้ไม่ได้
- 1.2 เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง และเช็ดด้วยสำลีชุบ Alcohol 70% ผึ่งให้แห้ง

### 2. Handle

เช็ดทำความสะอาดด้วยสำลีชุบ Alcohol 70 % ทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง ห้ามนำ handle ไปล้างน้ำแช่น้ำ หรือต้มทิ้ง

## การตรวจบำรุงรักษาระหว่างการจัดเก็บ

1. ตรวจสอบจำนวน blade และ handle ให้ครบตามที่กำหนด
2. ตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งาน โดยนำ blade และ handle มาประกอบกันเข้า โดยเอาส่วนที่เป็นตะขอที่โคน blade เกี่ยวกับสลักกลมที่ปลายของ handle จับ blade ขึ้นเสียงดังแก๊ก ไฟที่ปลาย blade จะสว่าง หากพบว่าไฟไม่สว่าง ให้หาสาเหตุเบื้องต้น โดยตรวจดูแบตเตอรี่ ภายใน handle ว่าหมดสภาพการใช้งานหรือไม่ หรือไฟที่ปลาย blade หมดสภาพการใช้งาน หรืออาจเป็นที่ contact ระหว่าง blade และ handle ให้ดำเนินการแก้ไขทันที
3. ตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องมือที่ปลาย blade ไม่ให้มีคราบเลือดหรือคราบฝุ่น โดยการเช็ดทำความสะอาดด้วยสำลีชุบ Alcohol 70%

### 7. เอกสารอ้างอิง

-

### 8. บันทึก

-

