

 <p>โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม</p>	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL		หมายเลขเอกสาร WI-DEN01-008
	ระเบียบปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 1 2 00.0. 2547	หน้า 1/2
เรื่อง วิธีการใช้เครื่อง Amalgamtor			

1. วัตถุประสงค์

ให้รู้จักวิธีการใช้เครื่อง Amalgamtor ที่ถูกต้อง

2. ขอบเขต

ครอบคลุมถึงส่วนประกอบของตัวเครื่องวิธีใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาบำรุง

3. นิยามศัพท์

เครื่อง Amalgamtor หมายถึง เครื่องผสม Amalgam ที่ใช้ในการอุดฟัน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

5.1 ส่วนประกอบ

- แคปซูล สำหรับใส่ alloy และปรอทเวลาผสม
- ลูกป้อน ใส่ในแคปซูล ช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีขึ้นควรใช้ลูกป้อนที่เขาจัดไว้สำหรับใส่ในแคปซูลที่ใช้ผสม
- ตัวเครื่องผสมประกอบด้วย
- ปุ่มสวิตช์ ปิด-เปิดที่ด้านหลังตัวเครื่อง
- ปุ่มตั้งเวลา ใช้กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้ในการผสม เวลาที่ใช้ผสมจะขึ้นอยู่กับชนิดของ alloy หยาบจะใช้เวลามากกว่า alloy ชนิดละเอียด ซึ่งแล้วแต่บริษัทผลิตจะกำหนด

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

6.1 วิธีผสม alloy และปรอทแบบบรรจุใส่แคปซูลด้วยตัวเอง ก่อนอื่นต้องทำความสะอาดแคปซูลและลูกป้อนที่จะใช้อย่าให้มีเศษ Amalgam เก่าเหลืออยู่ใน alloy และปรอท ตามอัตราส่วนที่กำหนดแต่ละชนิด ลงในแคปซูลพร้อมใส่ลูกป้อนในแคปซูล ปิดฝาให้แน่นนำไปใส่ในเครื่องปั่น

6.2 วิธีผสม alloy และปรอทในแคปซูลสำเร็จรูป

นำแคปซูลสำเร็จรูปใส่ในเครื่องปั่น ซึ่งมีตัวล็อกแคปซูลและมีฝาครอบปิดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อกันกระเด็นของแคปซูล หรือเศษวัสดุผสมที่อาจจะหลุดออกมาได้ เสียบปลั๊กไฟเปิดสวิตช์เครื่องปั่นตั้งเวลา กำหนดความเร็วที่บริษัทให้มากกดปุ่มสวิตช์เพื่อให้เครื่องทำงาน เมื่อเครื่องหยุดทำงาน เปิดฝาครอบออก นำแคปซูลออกมาเท Amalgam ที่ผสมแล้วออกมา

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT



โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ
เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI-DEN01-008

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่บังคับใช้ : 1 2 เม.ย. 2547

หน้า
2/2

เรื่อง วิธีการใช้เครื่อง Amalgamtor

6.3 วิธีบำรุงรักษา หลังจากเลิกใช้งานแล้ว ถอดปลั๊กออกไฟออก เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบ Alcohol ไม่มีเศษ amalgam ที่ผสมเหลืออยู่ เมื่อทำความสะอาดเครื่องเรียบร้อยแล้ว ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

7. เอกสารอ้างอิง

-

8. บันทึก

-

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT