







โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ  
เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร  
WI-DEN01-009

วิธีปฏิบัติงาน  
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่บังคับใช้ : 12 เม.ย. 2547

หน้า  
1/2

## เรื่อง วิธีใช้เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้จัก วิธีใช้อย่างถูกต้อง

### 2. ขอบเขต

ใช้ทำความสะอาดคราบหินปูนบนตัวฟัน

### 3. นิยามศัพท์

### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานทันตกรรม

### 5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

### 6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

#### 6.1 วิธีการเตรียมเครื่องมือชุดหินปูนไฟฟ้า

6.1.1 เสียบปลั๊ก

6.1.2 ต่อสายน้ำของเครื่องชุดหินปูนเข้ากับยูนิททำฟัน

6.1.3 กดปุ่ม on

6.1.4 เลือกหัวชุดให้เหมาะสมตามลักษณะ รูปร่างและต่อ insert เข้ากับ hand piece ให้สนิท

6.1.5 ตั้งปุ่มปรับกำลังเครื่อง เพื่อที่จะเป็นตัวนำให้ระดับกำลังงานสำหรับเครื่องชุด

6.1.6 จับ handpiece ให้ปลาย insert อยู่เหนือระดับอ่างน้ำ เขี่ยบสวิทซ์เท้าเพื่อให้น้ำไหลจาก handpiece ฟันเป็นละอองน้ำ

6.1.7 ไล่อากาศออกให้หมด

6.1.8 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การพ่นน้ำอยู่ในระดับอุณหภูมิที่ต้องการ และการทำงานด้านข้างของ หัวชุดนั้นสามารถเข้าถึงภายในปากได้ทั่วถึง

6.1.9 ปรับกำลังเครื่องหรือกำลังน้ำ ตามความจำเป็นที่จะให้ได้ระดับตามต้องการ

6.1.10 วางหัวชุดในปากของคนไข้ และใช้สวิทซ์เท้าควบคุม เพื่อกระตุ้นให้ hand piece ทำงาน และน้ำไหล

**หมายเหตุ :** ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้ากับคนไข้ที่ใช้ cardiac pacemaker

6.1.11 กดปุ่ม off เมื่อเสร็จการทำงาน

6.1.12 ถอดหัว p10 ออกจากเครื่องนำไปฆ่าเชื้อ

เอกสารควบคุม  
CONTROLLED DOCUMENT



โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ  
เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร  
WI-DEN01-009

วิธีปฏิบัติงาน  
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00  
วันที่บังคับใช้ :

หน้า  
2/2

## เรื่อง วิธีใช้เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า

### 6.2 ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและรายละเอียด

6.2.1 ยากนำเครื่องไปวางไว้ติดกับเครื่องฉายรังสี (radiator) หรือแหล่งกำเนิดความร้อนอื่น ๆ เพราะอาจจะทำให้เสียหายแก่เครื่อง

6.2.2 ตรวจสอบเช็คสภาพความพร้อมของเครื่อง

6.2.3 ทำความสะอาดหลังใช้งานในแต่ละวันสเปรย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วเช็ดถูเบาๆ ด้วยผ้าแห้ง

### 7. เอกสารอ้างอิง

-

### 8. บันทึก

-

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT