



โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ
เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI-IC01-010

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่บังคับใช้

20 ต.ค. 2547

หน้า
1/1

เรื่อง วิธีทำความสะอาดปรอทวัดไข้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำความสะอาดปรอทวัดไข้

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการทำความสะอาดปรอทวัดไข้ทุกชนิดที่ใช้กับผู้ป่วย

3. นิยามศัพท์

ปรอทวัดไข้ หมายถึง อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกาย

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่พยาบาล คณงาน

5. อุปกรณ์ และเครื่องมือ

5.1 ปรอทวัดไข้

5.2 ภาชนะมีฝาปิด 2 ใบ (Tray stainless) เพื่อบรรจุปรอทสะอาด

5.3 ภาชนะไม่มีฝาปิด 1 ใบ บรรจุน้ำผงซักฟอกสำหรับใส่ปรอทที่ใช้แล้ว

5.4 เปลี่ยนน้ำผงซักฟอกและน้ำยาที่ใส้แช่ปรอททุกวัน

5.5 ภาชนะที่บรรจุน้ำยาทำลายเชื้อห้ามรองด้วยผ้าก๊อช

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

6.1 ปรอทต้องแห้งเสมอก่อนนำมาใช้กับผู้ป่วย

6.2 นำปรอทแห้งให้ผู้ป่วยอมใต้ลิ้น หรือเหน็บที่รักแร้ให้แน่น ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กเล็กใช้ปรอทสำหรับวัดทางทวารหนัก ให้สอดเข้าทางทวารหนัก ภายหลังจากหล่อลื่นด้วยวาสลีนแล้ว

6.3 นำปรอทที่ใช้แล้ว แช่ในน้ำผงซักฟอก (สำหรับปรอทที่วัดทางทวารหนัก ล้างน้ำประปาก่อนแช่น้ำผงซักฟอก)

6.4 ล้างน้ำผงซักฟอกออกจากปรอท เช็ดให้แห้ง แล้วแช่ในน้ำยา alcohol 70 % นาน 30 นาที

6.5 นำปรอทที่แช่ alcohol 70 % ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วเช็ดให้แห้ง ก่อนเก็บ

ในภาชนะสะอาดหรือนำไปใช้ต่อไป

6.6 กรณีผู้ป่วยติดเชื้อหรือเป็นพาหะเชื้อคือยา หรืออยู่ในหอผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อสูง ให้แยกปรอทสำหรับใช้กับผู้ป่วยเป็นราย ๆ

7. เอกสารอ้างอิง

-

8. บันทึก

-

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

