

 <p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์</p> <p>เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึงพอใจ</p>	<p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</p>	<p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>WI-RAD01 -004</p>
	<p>วิธีปฏิบัติงาน</p> <p>WORK INSTRUCTION</p>	<p>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00</p> <p>วันที่บังคับใช้ : 11 ก.ย. 2551</p>
<p>เรื่อง วิธีการพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยลงบนแผ่นฟิล์ม</p>		

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเป็นการระบุว่าฟิล์มเอกซเรย์แต่ละแผ่นเป็นของผู้ป่วยรายใด
- 1.2 เพื่อแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยในแต่ละรายได้แก่
 - ชื่อของสถานพยาบาล / โรงพยาบาลและที่ตั้ง
 - คำนำหน้าชื่อ , ชื่อตัว – ชื่อสกุล อายุ ของผู้ป่วย
 - เลขที่รังสี (XN.)
 - วัน เดือน ปี ที่ทำการเอกซเรย์
 - เวลาที่พิมพ์ข้อมูลลงบนแผ่นฟิล์ม

2. ขอบเขต

ครอบคลุมเฉพาะฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยทุกแผ่นที่ผ่านการเอกซเรย์โดยงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

3. นิยามศัพท์

3.1 เครื่องพิมพ์ชื่อผู้ป่วยลงบนแผ่นฟิล์ม (ID. Printer) หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลของผู้ป่วยลงบนแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ (ในตำแหน่งติดกับหัวมุมด้านหนึ่งของแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ที่ได้ถ่ายแล้วก่อนจะนำไปผ่านกระบวนการล้าง เครื่อง ID. Printer มี 2 ประเภท คือ

1. ชนิดธรรมดา - การพิมพ์ชื่อผู้ป่วยต้องกระทำภายในห้องมืดเท่านั้น
2. ชนิด DAY – LIGHT - สามารถพิมพ์ชื่อได้โดยไม่ต้องอาศัยห้องมืด แต่ต้องใช้กับคาสเซตแบบมีวินโดว์เท่านั้น


3.2 คาสเซต (CASSETTE) หมายถึง อุปกรณ์ทางรังสีที่ใช้สำหรับบรรจุฟิล์มเอกซเรย์เพื่อใช้ในการถ่ายภาพทางรังสีของผู้ป่วยมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดฟิล์มที่ใช้ จำแนกได้ 2 ชนิด

1. ชนิดธรรมดา - ไม่มีช่องเปิดตรงตำแหน่งพิมพ์ชื่อผู้ป่วย การใช้งานสามารถใช้ได้กับเครื่อง ID. Printer ชนิดธรรมดาเท่านั้น
2. ชนิดมีวินโดว์ (Window) - ตรงตำแหน่งพิมพ์ชื่อผู้ป่วยมีช่องสามารถปิด – เปิดได้สะดวกในการใช้งานเพราะสามารถใช้ได้กับ ID. Printer ทั้ง 2 ชนิด แต่มีราคาสูงกว่า

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

นักรังสีการแพทย์ / เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ / คนงานเอกซเรย์

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT

 <p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ศูนย์บริการทางการแพทย์</p> <p>โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ใช้บริการพึงพอใจ เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม</p>	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL		หมายเลขเอกสาร WI-RAD01-004
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 11 ก.ย. 2551	หน้า 2/2
เรื่อง วิธีการพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยลงบนแผ่นฟิล์ม			

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

- 5.1 แผ่น Soundex Card
- 5.2 เครื่องพิมพ์ชื่อผู้ป่วย ID. Printer ชนิด DAYLIGHT – PRINTER
- 5.3 แผ่นคาสเสทใส่ฟิล์มชนิดมีวินโดว์ (Window) ที่ผ่านการเอกซเรย์แล้ว

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 6.1 เข้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเครื่อง ID. Printer ว่าอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานหรือไม่
- 6.2 นำ Soundex Card ของผู้ป่วยที่จะทำการพิมพ์ชื่อเสียบเข้าตัวเครื่อง ID. Printer ในตำแหน่งที่กำหนด ตรวจสอบตำแหน่งของ Soundex Card ให้ถูกต้อง
- 6.3 ทำการตรวจสอบคาสเสทว่ามีจำนวนและขนาดถูกต้องตรงกับจำนวนที่ถ่ายกับผู้ป่วยรายนั้นหรือไม่
- 6.4 ทำการพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วย โดยเสียบแผ่นคาสเสทตำแหน่งวินโดว์เข้าตัวเครื่องจนเครื่องทำการพิมพ์เสร็จ (สังเกตจากเสียง)
- 6.5 ดึงคาสเสทออกจากตัวเครื่อง
- 6.6 ทำตามขั้นตอนเดิมในข้อ 6.4 – 6.5 จนครบตามจำนวนที่ถ่าย
- 6.7 เปลี่ยน Soundex Card ใหม่ เมื่อพิมพ์เสร็จในผู้ป่วยแต่ละราย
- 6.8 นำคาสเสทที่พิมพ์ชื่อแล้วส่งเข้ากระบวนการล้างฟิล์มต่อไป

7. เอกสารอ้างอิง

-ไม่มี

8. บันทึก

-ไม่มี

9. เอกสารตัวอย่าง

-ไม่มี

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT

