

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ต้นฉบับ
MASTER

เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

วิธีปฏิบัติงาน

(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง วิธีการบำรุงรักษา Ophthalmoscope

หมายเลขเอกสาร WI-CAM01-003 จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน		4 / ๗๑ / ๖๖
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน		- 4 ส.ค. 2547
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน		- 4 ส.ค. 2547

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข

FM-DCC01-003: Rev.00
เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT



เราเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร

WI-CAM01-003

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่บังคับใช้ : - 4 ส.ค. 2547

หน้า

1/2

เรื่อง วิธีการบำรุงรักษา Ophthalmoscope

1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่อง Ophthalmoscope ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องให้คงสภาพการใช้งานที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการยืดอายุการใช้งานให้มากขึ้น

2. ขอบเขต

-

3. นิยามศัพท์

-

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ช่าง / บุคลากรทางการแพทย์ / เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องมือ

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

5.1 ผ้าสะอาด

5.2 น้ำสบู่

5.3 สารหล่อลื่น

5.4 เครื่องมือพื้นฐานของช่าง เช่น ไขควง , คีม ฯลฯ

5.5 สำลี

5.6 Alcohol 70 %

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

6.1 ความถี่ของการบำรุงรักษา ทุก 1 สัปดาห์


6.2 ทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆด้วยผ้านุ่มที่แห้งและสะอาด ถ้ามีความสกปรกอาจชุบน้ำสบู่อ่อนให้พอหมาด หรือชุบน้ำยาทำความสะอาดหลังทำความสะอาดแล้ว ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้งอีกครั้งหนึ่ง ส่วนที่จำเป็นต้องฆ่าเชื้อ ให้ทำตามวิธีที่ผู้ผลิตแนะนำ

6.3 ทำความสะอาดส่วนที่เป็นเลนส์ หรือกระจก หรือส่วนที่เป็นทางเดินของแสงโดยใช้ลูกบิบบาล์มไปยังบริเวณที่ต้องการหรือโดยใช้กระดาษเช็ดเลนส์ ส่วนที่เป็นFiber opticให้ทำความสะอาดที่ปลายทั้ง2ด้านด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ และเช็ดแห้งด้วยผ้าสะอาดหรือลูกบิบบ้างเบาให้แห้ง

6.4 ตรวจสอบสภาพถ่านไฟฉายที่อยู่ในHandle จะต้องไม่มีร่องรอยของการเสื่อมหรือสารเคมีภายในเยื่อออกมา ถ้าสารเคมีจากถ่านไฟฉายเยื่อ ไปถูกส่วนประกอบของHandle ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง ส่วนถ่านไฟฉายให้ ยกออกเพื่อนำไปทิ้งในสถานที่ที่เหมาะสม

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 <p>เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ จากประชาชน</p>	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL		หมายเลขเอกสาร WI-CAM01-003
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : - 4 ส.ค. 2547	หน้า 2/2
เรื่อง วิธีการบำรุงรักษา Ophthalmoscope			

6.5 Battery ชนิด Alkaline ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อม บันทึก วันเดือน ปี ที่ทำการเปลี่ยนลงบนตัว Battery ไว้ด้วย

6.6 Battery ชนิด Ni – Cd ควรมีการ Charge ไฟติดต่อกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้งานและไม่ควร Charge ด้วยระยะเวลาสั้นๆ บ่อย เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของ Battery สั้นลง

6.7 การเก็บรักษา / การใช้

6.7.1 ห้ามเก็บในที่ร้อนหรือเย็นเกินไป ควรจัดเก็บไว้ในที่เก็บที่แห้งสะอาด

6.7.2 หลังการใช้งานควรทำความสะอาด และเก็บเข้ากล่องบรรจุ ปิดฝากล่องทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

6.7.3 สถานที่จัดเก็บ หรือวางขณะใช้งานควรป้องกันการตกหล่นเพราะอาจทำให้กระจกสะท้อนแสงหรือเลนส์แตกหักเสียหายได้

7. เอกสารอ้างอิง

-

8. บันทึก

-

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT